

Shoof



WALKEASE™

Zestaw stworzony do szybkiej interwencji w przypadkach leczenia schorzeń racic i kopyt

Zestaw zawiera 10 klocków korekcyjnych WALKEASE™, specjalny klej WALKEASE™ 20 ml do przymocowania klocka do racicy, tarnik oraz 10 par rękawiczek gumowych.

Instrukcja obsługi:



Rys. 1 Zastosować leczenie racicy wedle potrzeby



Rys. 2 Usunąć odpowiednią ilość palca racicznego do nałożenia kleju

W pierwszej kolejności musi zostać przeprowadzone oraz zakończone leczenie chorej części racicy (rys.1). Dopiero po tym należy przygotować zdrowy palec raciczny do przyklejenia klocka WALKEASE™. Przygotowanie rozpoczynamy od oczyszczenia oraz usunięcia odpowiedniej ilości rogu zdrowego palca racicznego. Zalecamy używanie narzędzia – tarnika WALKEASE™, ponieważ tylko to narzędzia zapewnia odpowiednią obróbkę racicy. Niezwykle istotnym jest odpowiednie przygotowanie racicy. Racica musi być czysta i sucha z równą powierzchnią. W pierwszej kolejności należy dopasować wielkość oraz kształt klocka do palca racicznego na który będzie ona przklejona.

Trzymać klocek WALKEASE w taki sposób, aby strona na którą będzie nakładany klej nie została zabrudzona. **Musi pozostać idealnie czysta i sucha!** W przypadku zabrudzenia należy przemyć klocek gorącą wodą z detergentem lub alkoholem, a następnie dokładnie wysuszyć przed użyciem.

Bentley Polska Sp. z o.o.

Tel. +48 22 863 90 42 w. 3 Fax. +48 22 863 90 13

ul. Czeręśniowa 98, 02-456 Warszawa

www.bentleypolska.pl e-mail: bentleyfarm@bentley.pol.pl





Rys. 3 Nałożyć klej na klocek ciętymi ruchami obok siebie



Rys. 4 Przyłożyć klocek z klejem do racicy i przycisnąć mocno obejmując



Rys. 5 Po ok. 15 sekundach odwiązać kończynie i pozwolić zwierzęciu stanąć



Należy nałożyć rękawiczki w celu zabezpieczeniu rąk przed kontaktem z klejem (rys. 3). Nie nakładać za dużej ilości kleju (maksimum 2 ml). Niezwłocznie po nałożeniu kleju przyłożyć klocek WALKEASE™ do palca racicznego (rys. 4) tak aby nie wystawał więcej niż 2-3 mm poza obręb rogu racicznego. Po około 15 sekundach jednostajnego przyciskania klocek pozostanie na racicy po jej puszczeniu. W tym momencie należy zwolnić kończynę zwierzęcia tak aby szybko stanęło na klocek w celu jego dociśnięcia.

Klej wysycha niezwykle szybko po dociśnięciu klocka przez zwierzę do podłoża. Nadmiar kleju zostanie wyciśnięty i zasklepi drobne nierówności na brzegach. Dzięki temu powierzchnia styku będzie większa. Zaleca się przycięcie bardzo wystających klocków poza obrys racic, ponieważ mogą zostać uszkodzone przez inne zwierzęta.

W chłodniejsze dni czas przyklejenia się klocka może być dłuższy. Zaleca się pozostawienie zwierzęcia na dłużej w klatce tak, aby przez ten czas dociskało klocek swoją masą.

Nie czekaj!
Zamów już dziś
i daj wytchnienie
swoim krowom!

Bentley Polska Sp. z o.o.

Tel. +48 22 863 90 42 w. 3 Fax. +48 22 863 90 13

ul. Czeresniowa 98, 02-456 Warszawa

www.bentleypolska.pl e-mail: bentleyfarm@bentley.pol.pl

